




Q. 歯みがき剤を使用して、義歯をみがいてもよいですか？

A. 義歯を傷つける恐れがありますので、歯みがき剤(研磨剤入り)のご使用はお控えください。


Q. 寝ている間は、外した義歯をどのように保管すればよいですか？

A. 外した義歯は、水または一晩つけ置きしても義歯を傷めない義歯洗浄剤(エラック義歯洗浄剤など)に浸して保管してください。

Q. 義歯安定剤をつけたまま、義歯洗浄剤に浸してもいいですか？

A. 義歯安定剤をつけたままで洗浄できる場合もありますが、清潔に保つため、できるだけ毎日取り除いて清掃しましょう。

粘膜の清掃ポイント

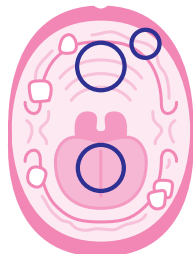

普段義歯で覆われている
歯肉や粘膜

舌の表面

●細菌等が繁殖しやすいので、柔らかい毛の粘膜ケア用ブラシ等で、やさしくブラッシングしましょう。

●義歯安定剤を使用している方は、特にお口の中に残っている義歯安定剤をきれいに取り除きましょう。

●舌苔(舌表面の付着物)が見られる場合は、奥から手前に2~3回軽い力でブラッシングしましょう。



❗粘膜はデリケートで傷つきやすいので、こすりすぎ、力の入れすぎは禁物です。



粘膜のケアに
エラック510

清潔な義歯で快適な毎日を♪



汚れた義歯(入れ歯)は、むし歯や歯周病、口臭の原因になるだけでなく、口内炎や肺炎を引き起こすこともあります。毎日の正しいお手入れがとても大切です。


理想的な義歯清掃方法は、3ステップ洗浄

1




流水下で食べかすなどのおおまかな汚れを洗い流してから、義歯ブラシで義歯を清掃します。

❶力の入れすぎ、研磨剤配合歯磨剤の使用は禁物です。義歯を傷つける恐れがあります。

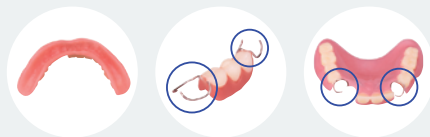

汚れやすい場所は念入りに


2

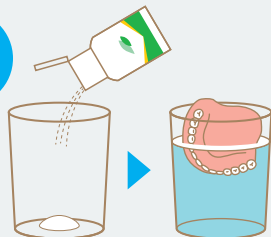

初めてお使いになるときは、計量カップをはずし赤い中栓を取り除き、キャップをしっかりと取り付けてください。

- ①コップに義歯洗浄剤1回分を入れます。
- ②水又はぬるま湯約150mlを加えて、義歯を浸します。
- ❶義歯を傷める恐れがあるため、熱湯は厳禁です。

エラック義歯洗浄剤の色変化

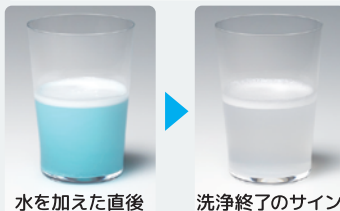

- ③15分目安に浸漬してください。液の色が変わったら洗浄終了のサインです。

3



義歯を取り出し、流水下でブラッシングします。浮き上がった汚れと洗浄剤をきれいに洗い流します。



エラック
義歯洗浄剤(顆粒)



エラック義歯ブラシ
らくらくスタイル